

回って止まって 前後にスライド！テーブルにピタッ！

# ピタットチェア Fit


「持ち上げない介護」「抱きあげない介護」  
自立支援へのサポートを目的に  
現場の意見から生まれた 優しい介護椅子です

● こんな方にも ●  
・パーキンソン病  
・脳梗塞による片麻痺  
・関節症など  
・杖を利用している方

## レバー操作の特徴

### ■左右に回転レバー

回転レバーを引くことでロックが解除され、45度ごとに回転が自動ロックします。

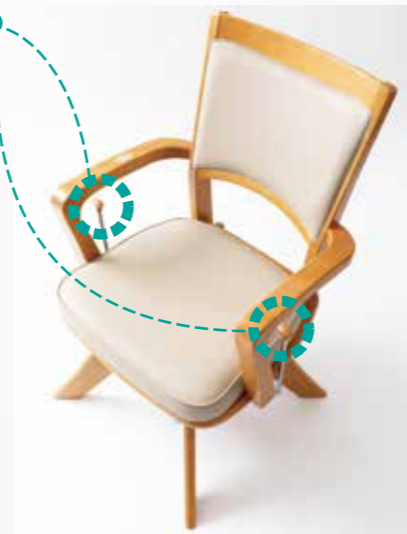

### ■介助者用 スライドボタン

サポートする方が座面を前後にスライドする場合に、ボタンを押しロックを解除しながら座面を押し引きできます。

### ■スライドレバー

ご自身で操作ができる場合には、スライドレバーを引き上げることでロックが解除し前後に12cmスライドし自動的にロックします。車のシート調整と同じ操作なので直感的な操作が可能です。

## 4つの機能



機能説明動画

### 回転機能

レバー操作が利き手にフィット！


ロックを解除して座ったまま向きを変えられます。座面下に国内産回転盤が組み込まれており、回転レバーでロックを解除すると、座面が回転して45度ごとに再ロックされる仕組みになっています。回転レバーは手で操作可能なロングレバーを左右に装備しており、利き手に関係なく操作が可能です。



### 45度安全ストッパー機能

45度の安全ストッパーが住環境にフィット！

45度ごとにロック位置があり、車椅子からの移乗や立ち上がりでテーブルを支えにする時など、丁度良いところでストッパーがかかります。一挙にぐるりと回転したり、回り続けたりすることはありませんので安心です。また離着座の際に座面が回転することはないので、回転方向に体重がかかっても転倒の心配はありません。「カチャッ」という音がロックの合図です。

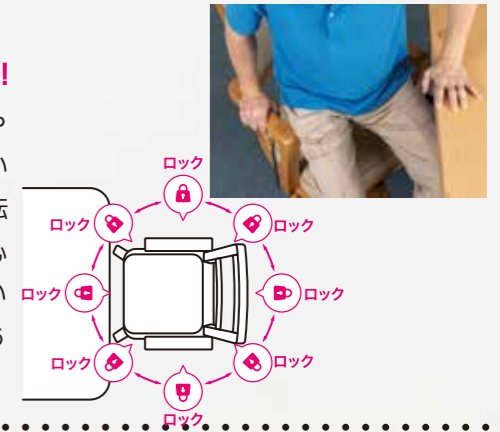

### 前後スライド機能

スライドさせてテーブルにピタッとフィット！


軽い力でテーブルや机に近づくことができる機能。座面の前下に取り付けられているスライドレバーを引き上げると、座面が前方に12cmスライドします。車の運転席・助手席のシート調整と同様の操作で座面をスライドさせることができます。また、後方にあるスライドボタンはスライドレバーと連動しており、介助者の方が後方から操作するのに便利です。



### 座面高さ調節機能

座面の高さが体格にフィット！

座面下のスペーサーの入れ替えにより、座る人の体格に合わせて、座面高さを2段階(440・390mm)に組み換え可能です

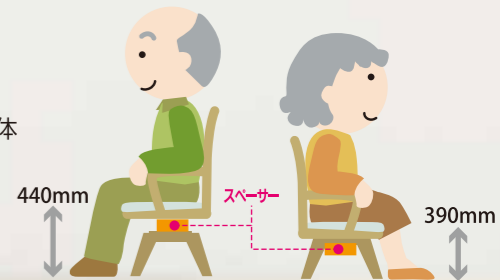

ピタットチェア Fit には介護現場の声を形にした 4つの大きな機能があります


ピタットチェア Fit PT-FT23

定価 59,800円 (税別) 組立完成品



【仕様】

寸法 右図参照  
 重量 15Kg  
 張り地 合成皮革  
 フレーム材質 ラバーウッド  
 フレーム上面加工 アミノアルキド塗装  
 色 ナチュラル(NA)  
 ダーク(DK)  
 付属品 脚裏フェルト  
 保証期間 ご購入後1年間

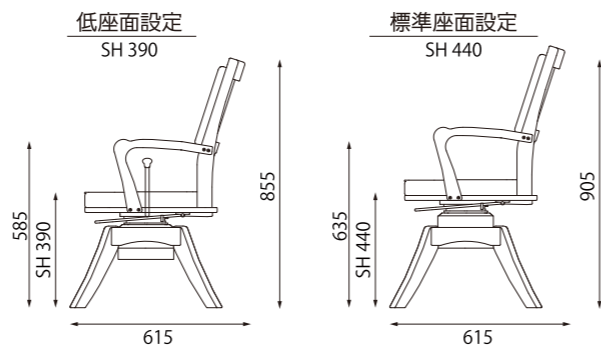

色は2色からお選びいただけます。



●ナチュラル(NA) ●ダーク(DK)

関連動画




TV番組 (初号機 PT-17)



介護現場を元気にする 理学療法士 / 松本リハビリ研究所



好好生活 (香港動画)

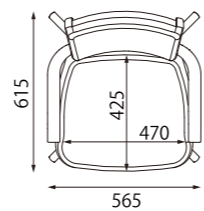

オプションのご案内



介助延長スライドレバー  
 3,000円 (税別) PT-KJL  
 スライドボタンを延長することにより、介助者が腰を屈めることなく、背面から座面をスライドさせることができます。



ヘッドレスト  
 19,800円 (税別) PT-HDR20  
 高さや角度の調整ができます。



ピタットクッション  
 26,000円 (税別) PT-CS (各色)  
 両サイドと背面から、体幹をしっかりホールドします。お子様や小柄な方、上半身を支える力が弱い方をサポートします。



つえポンS  
 800円 (税別) TH-S002  
 しっかり固定してラクに取り外しができます。

配送、開梱、設置、梱包材の回収まですべてスタッフにおまかせ。


手間なし スマイル便

配送スタッフ2名で、商品の開梱、設置、梱包材の引き取り処分まで丁寧に行うサービスです。お届け時間も指定可能で、離れたところにお住いのご家族へのプレゼントに大変好評です。料金は都度見積もりとなります。詳しくはお問い合わせください。

T字脚テーブルセットアップ



T字脚タイプのテーブル。四本脚に比べ、回転時にテーブルの脚が邪魔になりません。

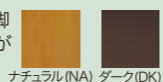

回って止まって 前後にスライド！テーブルにピタッ！

# ピタットチェア Fit

テーブルに 軽い力でピタッと着けるので 毎日の食事も楽々！お座りになるご自身でも簡単に操作が可能です。

特許取得済



みんなで創る福祉家具のブランド

株式会社 オフィス・ラボ

〒791-1106 愛媛県松山市今在家 4-9-32  
TEL.089-958-2483 FAX.089-958-2109

https://officelabo.co.jp

※商品の色は実物とは多少異なる場合がございます。※掲載の商品は品質保持の為、予告なく仕様・価格を変更する場合がございます。

「実物が見たい！座ってみたい！」  
全国の展示場及び、展示ショップをご案内。是非ご体験ください▷



お問い合わせは



## ラクラク介護椅子

簡単操作  
 負担を軽減  
 持ち上げない  
 自立支援に

印刷：2023年8月